

SINUS A výplach nosa

Nosový výplach

120 ml fľaša + 12 vreciek s práškom pre prípravu roztoku

Návod


Zloženie: chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný

Vlastnosti: Výplach nosa zmierňuje príznaky spôsobené alergiami, infekciou dutín, suchým vzduchom, upchatým nosom, stekaním hlienov do hrdla a tehotenskou nádchou. Bolo klinicky preukázané, že poskytuje účinnú úľavu pri nepríjemných ochoreniach dutín a nosa a podporuje lepšie dýchanie. Fľaša používa fyziologický roztok na umývanie nosových priechodov. Je to prirodzené a bezpečné pre deti od 12 rokov a dospelých, vrátane tehotných a dojčiacich matiek a ľudí užívajúcich iné lieky. Jednoducho rozpustíte vrecúško s vopred namiešanými solnými prísadami v teplej vode vo fľaši, dobre pretrepte a fľaštičku stlačte a osviežte a chráňte nosové priechody.

Indikácie: Pomáha pri zmierňovaní symptómov dutín ako je stekanie hlienov do hrdla, upchatý nos, suchosť ďalej pomáha pri nosovej alergii, podráždení nosa prachom z povolania, výparmi, srstou zvierat, trávou, pelom, dymom, smogom a domácim prachom.

NEPOUŽÍVAJTE U DETÍ DO 12 ROKOV!

Návod na použitie: Vložte 1 vrecko do fľaštičky (02). Naplňte ju vodou do objemu 120 ml a dobre pretrepte (03 a 04). Vložte trysku do každej nosovej dierky (05). Stlačte fľašu (06). Opakujte tento krok, kým neucítite tok roztoku cez druhú nosovú dierku, zopakujte predchádzajúce dva kroky, aby ste uvoľnili nos. Pozrite si obrázky nižšie.

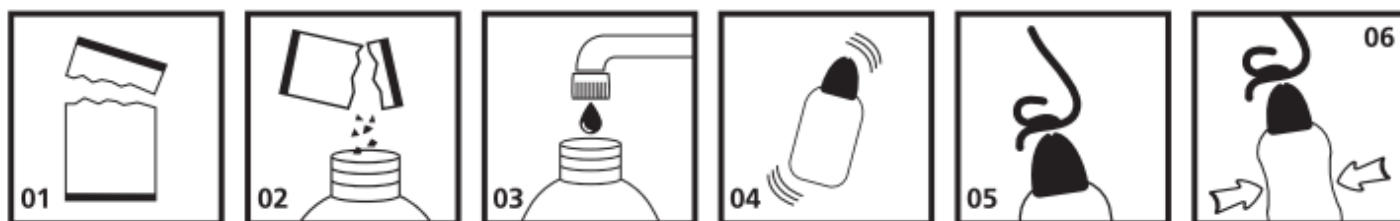

Dávkovanie: Dospelí a deti od 12 rokov: 1-2 vrecká každé 2 hodiny tak často, ako je to potrebné.

Upozornenie: Prestaňte používať a opýtajte sa lekára, ak je vyplachovanie nepríjemné alebo ak príznaky neustupujú. Tento produkt je na osobné použitie, nepoužívajte rovnakú fľašu pre viac ako jednu osobu. Po každom použití umyte mydlom a vodou.

Vedľajšie účinky: Pri správnom používaní nosového výplachu bolo hlásených relatívne málo vedľajších účinkov a považujú sa za menej závažné. Patrí medzi nich svrbenie a mierny pocit štípania vo vnútri nosa.

Sinus A nosový výplach je bezpečný na použitie počas tehotenstva a dojčenia.



Skladovanie: Vrecúška s práškom na prípravu fyziologického roztoku chráňte pred nadmerným teplom a vlhkosťou, skladujte v teplote medzi 5-30 °C.









Spotrebujte do 12 mesiacov od otvorenia.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie: 120 ml fľaša + 12 vrecúšok s práškom na prípravu fyziologického roztoku (3g).


V prípade náhodného zasiahnutia očí okamžite a dôkladne vyplachujte čistou vodou, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.


Všetky vážne nehody týkajúce sa nami dodanej zdravotníckej pomôcky musia byť nahlásené výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza vaše sídlo.

	Kód produktu
	Číslo šarže
	Skladujte na suchom a chladnom mieste
	Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
	Prečítajte si návod na použitie
	Pozor: Pozorne si prečítajte návod
	Dátum spotreby
	Zdravotnícka pomôcka spĺňa požiadavky nariadenia EU 2017/745

	Výrobca
	Teplota skladovania
	Dátum výroby
	Zdravotnícka pomôcka
	Nepoužívajte ak je obal poškodený
	Na jednorazové použitie
	Nesterilné.
	Distribútor

REF T1015.428.0001 (GIMA 28084)

 Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin
Yazicioğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İstanbul / TURKEY

 Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

